

SHEDA TECNICA

Maschera Nasale ESON™ ventilata completa di fasce nicali

CODICI: 400449 - 400450 - 400451 - 400452 - 400453 - 400454 - 400455
ESON™

REV 22-06-2015 _____ Pag 1 di 4 _____

Nome Commerciale: Maschera nasale ESON™ riutilizzabile ventilata per CPAP e BiLevel completa di fasce nicali - tre misure disponibili (vedi riferimenti codici)

Codici: 400449 - 400450 - 400451 - 400452 - 400453 - 400454 - 400455

Marcatura: CE

Classe CE: IIa

Riferimenti Normativi: 93/42/EEC

Confezionamento: Singolo

Codice CND: R03010102

Codici RDM: 616667 (400449) / 805448 (400450) / 805449 (400451) /
616688 (400452) / 710009 (400453) / 710011 (400454) /
710012 (400455)

LATEX FREE

Prodotto da: Fisher&Paykel HealthCare Ltd.

Stabilimenti: Auckland - New Zealand

Distribuito da: Fisher&Paykel HealthCare S.A.S.

Immagine:



Maschera Nasale ESON™



Cuscinetto "RollFit"

SHEDA TECNICA

Maschera Nasale ESON™ ventilata completa di fasce nicali

REV 22-06-2015 _____ Pag 2 di 4 _____

Descrizione:

La maschera nasale ESON™ è progettata per soddisfare autonomamente le esigenze del paziente.

La maschera nasale ESON™ è composta solamente da tre componenti leggeri e dalle linee arrotondate ed anatomiche che lavorano insieme per garantire maggiori prestazioni, stabilità e comfort, oltre all'autoregolazione della maschera stessa.

La maschera nasale ESON™ è molto compatta ed è dotata di innovazioni tecnologiche ideate per migliorare il riposo del paziente, ed in particolare:

Cuscinetto RollFit™

Fasce nicali ErgoFit

Struttura Easy Frame

che lavorano in armonia per fornire le già ben note caratteristiche di comfort, tenuta e facilità d'uso delle maschere Fisher&Paykel Healthcare.

➤ Cuscinetto RollFit™



Come suggerisce il suo nome, il cuscinetto in silicone a pezzo unico "rotola" avanti e indietro sul setto nasale per auto-adattarsi alla conformazione anatomica del paziente. La tecnologia RollFit™ garantisce la riduzione al minimo della pressione sul setto nasale ottimizzando il confort e, allo stesso tempo, garantisce la massima tenuta senza perdite grazie anche alle **alette integrate di supporto** ideate per garantire prestazioni ottimali di tenuta e stabilità per tutta la notte.

La confezione viene fornita, a seconda del codice, con **uno** o con **due cuscinetti** intercambiabili per garantire la massima versatilità e adattabilità della maschera a qualsiasi esigenza.

Codice 400449	Maschera Nasale Eson S , completa di un cuscinetto di misura S
Codice 400450	Maschera Nasale Eson M , completa di un cuscinetto di misura M
Codice 400451	Maschera Nasale Eson L , completa di un cuscinetto di misura L
Codice 400452	Maschera Nasale Eson M/L , completa di due cuscinetti di misura M e L
Codice 400453	Maschera Nasale Eson S/S , completa di due cuscinetti di misura S
Codice 400454	Maschera Nasale Eson M/M , completa di due cuscinetti di misura M
Codice 400455	Maschera Nasale Eson L/L , completa di due cuscinetti di misura L

SHEDA TECNICA

Maschera Nasale ESON™ ventilata completa di fasce nicali

REV 22-06-2015 _____ Pag 3 di 4 _____

➤ Fasce nicali ErgoFit




Le nuove fasce nicali **ErgoFit** a corona sono facili da usare, facili da indossare, facili da regolare e facili da pulire.

Le nuove fasce nicali **ErgoFit**, ergonomiche e traspiranti, sono state progettate per posizionarsi naturalmente sul retro del capo, consentendo il massimo movimento della testa, sia laterale sia in alto e in basso, senza che la maschera si sposti.

Le fasce nicali **ErgoFit** sono dotate di strisce in **VELCRO®** per una facile regolazione e di comodi ganci **Easy-Clip** per essere indossate e rimosse facilmente senza la necessità di doverle regolare ogni volta.

Grazie alla fascia superiore regolabile viene aumentata la stabilità della maschera.

➤ Struttura della maschera Easy Frame

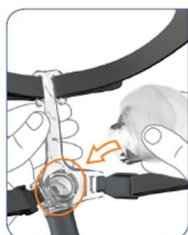


La struttura della maschera **Easy Frame** dalle linee arrotondate è stabile, resistente, duratura e di dimensioni ridotte per consentire un ampio campo visivo.

La struttura **Easy Frame** a misura unica è utilizzabile con cuscinetti di diversa misura (S/M/L) ed è dotata di attacco **Easy-Clip** per un montaggio semplice e veloce dopo le operazioni di pulizia della maschera.

Il connettore ventilato è dotato della protezione **Q cover** con filtro per un utilizzo silenziosissimo e per ridurre al minimo il fastidioso flusso di uscita verso il partner.

La giuntura a sfera permette al connettore di ruotare in ogni direzione per consentire la massima libertà di movimento, minimizzando la trazione applicata dal e al circuito respiratorio.

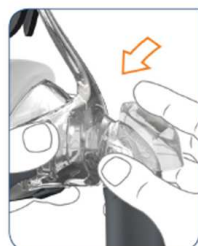

F&P Eson è molto "facile da indossare", dalla confezione al letto

F&P Eson è stata progettata per ottimizzare il confort
e la semplicità d'uso senza inconvenienti, minimizzando
le regolazioni manuali, il numero di pezzi e il rumore

SHEDA TECNICA

Maschera Nasale ESON™ ventilata completa di fasce nicali

REV 22-06-2015 _____ Pag 4 di 4 _____

Contenuto della confezione:

- Maschera nasale ESON™ completa di Fasce nicali assemblata e pronta all'uso
- Semplice Guida per indossare la maschera
- Manuale d'uso multilingua

Materiali:

Struttura della maschera:	Lexan HP2 1H111
Cuscinetto:	Silicone LSR 4841
Connettore:	Lexan HP2 1H111
Fasce nicali	Breath-o-prene™

Caratteristiche della maschera:

- Pressione di funzionamento: 4 - 25 cmH₂O
- Temperatura di funzionamento: 5 - 40 °C
- Spazio morto:
 - ESON™ S: 61cc
 - ESON™ M: 67cc
 - ESON™ L: 79cc
- **Resistenza al flusso:**
 - Calo di pressione nella maschera a 50 l/min con filtro diffusore: 0,14 cm H₂O
 - Calo di pressione nella maschera a 100 l/min con filtro diffusore: 0,65 cm H₂O
 - Calo di pressione nella maschera a 50 l/min senza filtro diffusore: 0,15 cm H₂O
 - Calo di pressione nella maschera a 100 l/min senza filtro diffusore: 0,62 cm H₂O
- **Flusso aria in uscita:** vedi tabella riportata nelle istruzioni d'uso della maschera

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo, e non sostituiscono i documenti di riferimento, in particolar modo il manuale d'uso e/o il manuale tecnico